



Patienten-Arzt- u. Praxis-Pager, Wartelösungen

Gäste-Pager, Videoüberwachung, KassenVideo, IT-Spezialprodukte, Software-Entwicklung, IT-Service

Pager Pflgetipps

So haben Sie möglichst lange Freude an Ihren neuen Pagern.

Um möglichst lange die Pager nutzen zu können, sollten Sie die folgenden Tipps beachten.

1. Nach der Lieferung oder Winterpause mindestens 10 Std. aufladen. Bei einer Winterpause 1x monatlich die Pager komplett aufladen (24 Std.)
2. Über Nacht die Pager nicht ausschalten. Sonst ist ein Dauerbetrieb am Tag nicht möglich.
3. Achten Sie darauf, dass die Pager nie komplett entladen sind (Tiefentladen). Das überleben die Akkus oftmals nicht.
4. Einmal pro Woche die Kontakte anschauen, ob diese schmutzig sind und dann schlecht geladen werden könnten. Einfach trocken reinigen.
5. Die Pager im Kreislauf nutzen. Nicht immer nur die 1 ausgeben und den Pager 10 selten. Einfach mal die Pager in die andere Reihenfolge lang aufstecken.
6. Optimal sind zwei Ladestationen. Eine für die frisch geladenen Pager, eine für die zurückgegebenen Pager.
7. Aus hygienischen Gründen die Pager einmal pro Woche mit einem Desinfektionsmittel reinigen.
8. Achten Sie bei der Rückgabe der Pager auf die Ladestationen, dass der Pager fest angedrückt wird, bis ein einrasten zu spüren ist.

Wenn ein Pager mal nicht funktionieren sollte, so laden Sie diesen erst komplett 24 Std. auf und versuchen es erneut. Geht er dann immer noch nicht, kontaktieren Sie unseren Support unter support@alpha11.de

www.alpha11.de

www.arzt-pager.de

www.apronti.de